



10.DV.1684



10.DV.1684.1



10.DV.1684.2

Este manual refere-se ao produto cuja referência é:

Ref. ^a	ESTRUTURA EM AÇO C/ PINTURA EPOXI ATOXICA	LEITO BIPARTIDO MADEIRA E ESPUMA (≈50MM) REVESTIDO A NAPA		LEITO OVAL BIPARTIDO MADEIRA E ESPUMA (≈80MM) REVESTIDO A NAPA		BASE	ELEVAÇÃO		Peso Kg
		Com Abertura Facial	Sem Abertura Facial	Com Abertura Facial	Sem Abertura Facial		Elétrica	Hidráulica	
10.DV.1684	√	√				4 rodas c/ sistema de imobilização		√	65
10.DV.1684.1									67,3
10.DV.1684.2				√					64
10.DV.1686			√						67,3
10.DV.1686.2					√				64

NOTA: Este produto não carece de montagem por parte do cliente exceto no caso da aquisição dos acessórios.

FIM A QUE SE DESTINA

Estrutura bipartida hidráulica destinada aos seres humanos para diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença, lesão ou deficiência.

Dispositivo Médico Não Ativo Classe I. - DL 145/2009 que transpõe a Diretiva nº 2007/47/CE.(MDD 93/42/EEC).

CUIDADOS E INDICAÇÕES A TER EM ATENÇÃO

Antes de utilizar, manusear e limpar deve ler atentamente estas indicações e seguir as recomendações do fabricante:

- ✓ **Atenção** ao perigo de esmagamento ou lesão das mãos/dedos:
Entre a estrutura e as zonas articuladas do produto, durante a movimentação e colocação na posição horizontal.
Entre a alavanca de regulação do amortecedor da Cabeceira e respetiva zona de articulação, a estrutura de elevação do divã e a zona de imobilização das rodas. 
- ✓ A pega de controlo dos mecanismos de regulação da cabeceira, pode ser acionada involuntariamente por aplicação de uma força accidental, causando uma queda inesperada.
- ✓ Após deslocação do produto que possuem rodas (Ø75mm), estas devem ser travadas com o sistema de imobilização de forma a evitar deslocamentos imprevistos que coloquem em perigo o paciente ou utilizador.
- ✓ **É expressamente proibido sentar** nas extremidades do divã marquesa, pode levar ao desequilíbrio da mesma e consequentemente provocar queda inesperada.
- ✓ O paciente deverá sentar-se unicamente sobre a zona do assento. Baixar se necessário a altura do divã para facilitar a subida do paciente. A elevação em altura do divã/marquesa hidráulica é acionada pelo pé.
- ✓ As referências 10.DV.1684/6 possuem apenas 1 pedal do lado esquerdo do divã marquesa para elevação em altura.
- ✓ As referências 10.DV.1684.1/2/6/2 possuem pedal em ambos os lados do divã marquesa para elevação em altura.
- ✓ No divã de elevação hidráulica o pedal verde quando pressionado **repetidamente** efetua a subida enquanto o vermelho quando pressionado **continuamente** efetua a descida.
- ✓ A articulação da cabeceira é efetuada por meio de uma avalanche que quando pressionada aciona um amortecedor de regulação da cabeceira na posição desejada de 0° a 65°. Dimensões: Cabeceira 650x680mm Corpo fixo 1240x680mm.
- ✓ Recomenda-se a supervisão constante do produto por pessoal autorizado durante a sua utilização.
- ✓ Em caso de necessidade pode adquirir 1 par de Guardas Laterais pintadas (10.DV.1689) ou inox (10.DV.1688) não incluídas no produto standard.
- ✓ Por razões de segurança recomenda-se que a elevação em altura não seja a mais de 800mm.
- ✓ As referências 10.DV.1684/6 **não foram concebidas** para massagens. As restantes referências apesar de não terem sido concebidas para a realização de massagens, permitem o seu uso para massagens desde que a cabeceira seja colocada na posição horizontal, ou seja, com inclinação/ângulo 0°.
- ✓ Recomenda-se o uso da folha de papel para proteger o estofa e o paciente. Suporte Rolo Papel (10.DV.1699.1) incluído.
- ✓ O conjunto estofado dos divãs marquesas são inflamáveis não devendo ser colocados próximo de fontes de ignição.
- ✓ O hidráulico após o seu tempo de vida útil deverá ser entregue a uma entidade licenciada para eliminação de resíduos de acordo com a legislação em vigor.
- ✓ O hidráulico é silencioso e tem uma força dinâmica de 10 Kn até 270 bar (indicação do fabricante certificado).
- ✓ O divã marquesa suporta apenas um paciente de cada vez e cujo peso seja inferior a 170 kg





Muita atenção a este símbolo, ele está localizado junto das zonas de contato de duas superfícies, podendo ocorrer esmagamento devido ao movimento das secções articuladas, caso os dedos ou mãos estejam sobre zona de contato.

Nota: Durante a elevação do divã entre a posição mais baixa e a mais alta existe um deslocamento do leito de 75mm para o lado da cabeceira.





10.DV.1684/6



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

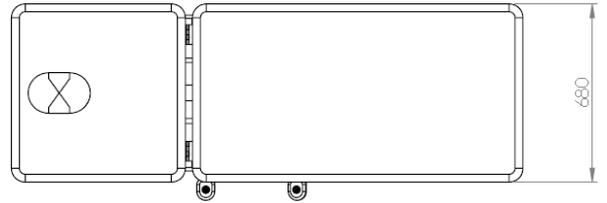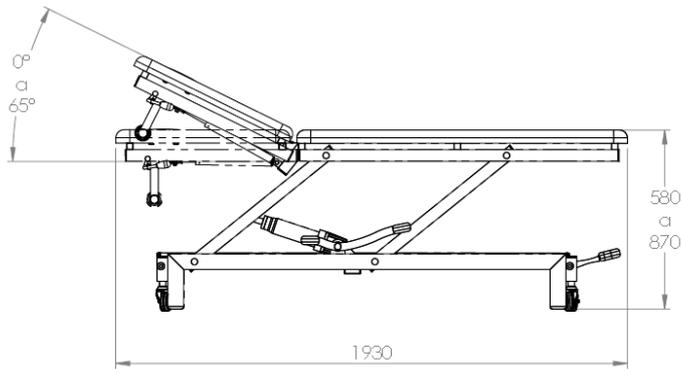

10.DV.1684.1

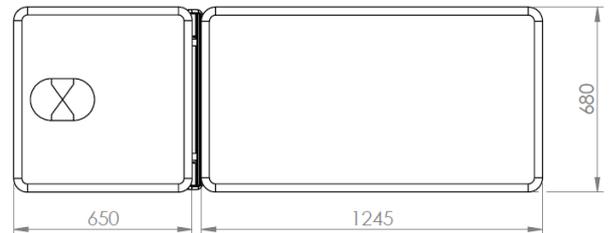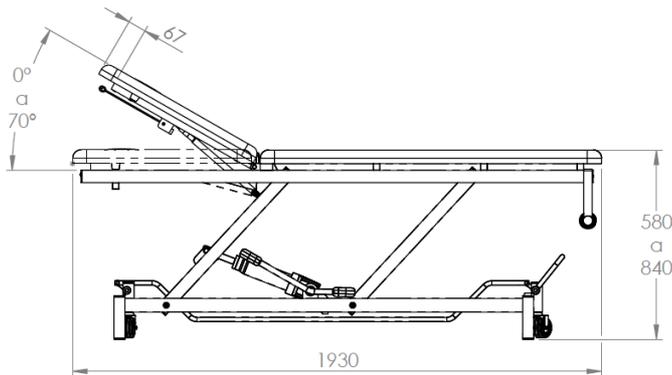

10.DV.1684.2

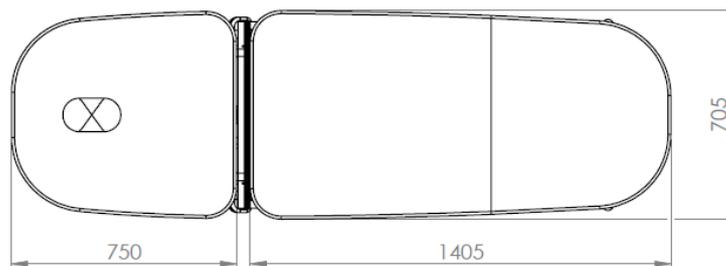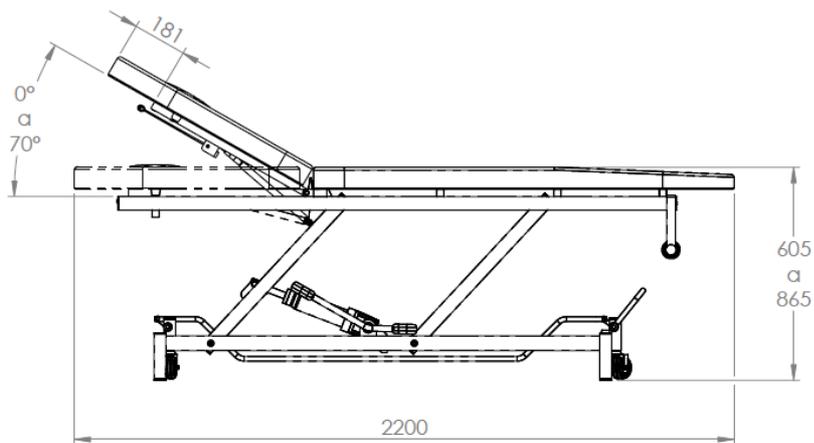

LIMPEZA

- ✓ A limpeza é muito simples graças à sua superfície plana. Para limpar use um pano húmido e macio e de seguida passe um pano seco.
- ✓ Nas operações de limpeza não utilizar detergentes e/ou materiais que possam danificar ou riscar este produto.
- ✓ Nas operações de limpeza e desinfeção recomenda-se a utilização de um produto apropriado para limpeza e desinfeção de dispositivos médicos. A frequência da limpeza deverá ser determinada em função das necessidades, do local onde o produto se encontra e das vezes que é usado.
- ✓ **Nunca utilize** estações de lavagem automática, lavagem em túnel, água a alta pressão ou sprays líquidos, nas operações de limpeza. Corre o risco de danificar o acabamento/pintura assim como o estofado. Evite que a água penetre nas costuras do estofado e quando não for suficiente a limpeza com um pano seco, usar uma esponja molhada em água com sabão e secar a superfície logo de seguida.
- ✓ Não utilize solventes como benzeno, álcool ou substâncias semelhantes!

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO

- ✓ Os divãs marquesas são fornecidos montados e embalados em cartão e/ou filme.
- ✓ Devem ser armazenados em locais com temperatura e humidade controlada (temperatura abaixo dos 25°C, humidade inferior a 60%), de forma a não danificar a embalagem nem o produto.
- ✓ Devem estar protegidos de eventual queda de objetos.
- ✓ Devem ser armazenados na horizontal, sempre que possível dentro da caixa, com o estofado para cima, não devendo ser empilhados.
- ✓ A JMS não assume qualquer responsabilidade por danos causados por mau uso, desrespeito destas ou outras indicações ou negligência na utilização e manuseamento do produto.
- ✓ À JMS reserva-se o direito de efetuar qualquer alteração ao design, funcionalidade, estética e comercialização dos seus produtos, em qualquer altura, sem aviso prévio, bem como, a atualização deste manual sempre que necessário.

PROTEÇÃO DO AMBIENTE

A JMS preocupa-se com a preservação do Ambiente em tudo o que faz. Solicitamos que:

- ☞ Separe os resíduos da embalagem e os encaminhe para os ecopontos correspondentes ou para operadores licenciados.
- ☞ Após o tempo de vida útil, entregue o produto a um operador licenciado.
- ☞ Não coloque o produto no lixo junto de resíduos comuns.
- ☞ Obrigado pela sua colaboração!

