



MANUAL DE UTILIZADOR

Divã Elétrico Bipartido Simples





FABRICANTE



JMS – Indústria de Mobiliário Hospitalar, S.A.
Rua Zona Industrial do Bunheiro, 26
3870-021 Murtosa – Portugal

T: (+351) 234 880 018 | E: jms@jmshealthcare.com

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Contacte o Distribuidor autorizado.

MU.21.129.R0.PT | 14.03.2024

INTRODUÇÃO

Fim a que se destina

Estrutura bipartida, elétrica, destinada a dar suporte à atividade médica, nomeadamente para diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença, lesão ou deficiência.


Este manual refere-se aos produtos cujas referências são:

Ref. ^a	ESTRUTURA EM AÇO C/ PINTURA EPOXI ATOXICA	LEITO BIPARTIDO MADEIRA E ESPUMA (≈50MM) REVESTIDO A NAPA		BASE	ELEVAÇÃO	Peso/ Kg
		Com Abertura Facial	Sem Abertura Facial		Elétrica	
10.DV.1682.1	√	√		4 RODAS COM SISTEMA DE IMOBILIZAÇÃO	√	66
10.DV.1682.2		√			√	
10.DV.1683			√		√	
10.DV.1683.1			√		√	
10.DV.1683.2			√		√	




CUIDADOS E OUTRAS INDICAÇÕES A TER EM ATENÇÃO

Antes de utilizar, manusear e limpar deve ler atentamente estas indicações e seguir as recomendações do fabricante:

- **Atenção** ao perigo de esmagamento ou lesão das mãos/dedos: Entre a estrutura e as zonas articuladas do produto, durante a movimentação e colocação na posição horizontal. Entre a alavanca de regulação do amortecedor da Cabeceira e respetiva zona de articulação, a estrutura de elevação do divã e a zona de imobilização das rodas. 
- A pega de controlo dos mecanismos de regulação da cabeceira pode ser acionada involuntariamente por aplicação de uma força accidental, causando uma queda inesperada. Cabeceira com abertura facial.
- Após deslocação dos produtos que possuem rodas giratórias sem travão (75mm) estas devem ser travadas com o sistema de imobilização de forma a evitar deslocamentos imprevistos que coloquem em perigo o paciente ou utilizador.
- O paciente deverá sentar-se unicamente sobre a zona do assento. Se necessário baixar a altura do divã para facilitar a subida do paciente. A elevação em altura dos divãs elétricos é efetuada por um comando de pé (pedal).
- No divã, o comando de pé quando pressionado, efetua a subida (botão da esquerda) e descida (botão da direita).
- A articulação da cabeceira é efetuada por meio de uma alavanca que quando pressionada aciona um amortecedor de regulação da cabeceira na posição desejada entre 0° e 65°. Este divã não foi concebido para massagens. No entanto, é possível fazer massagens no paciente se isso não implicar força ou movimentos que possam danificar a estrutura/leito.
- Dimensões: Cabeceira 650x680mm Corpo fixo 1240x680mm.
- Altura variável entre 540 a 850mm (aproximadamente).
- Recomenda-se a supervisão constante do produto por pessoal autorizado durante a sua utilização.
- Recomenda-se que se desligue o divã/marquesa após alcançar uma altura correta, ou o afastamento do pedal da zona dos pés a fim de evitar acionamento involuntário.
- Por razões de segurança recomenda-se que a elevação em altura não seja a mais de 800mm.
- Suporte para rolo de papel (500mm) incorporado na cabeceira.
- Recomenda-se o uso da folha de papel para proteger o estofado e o paciente.
- O conjunto estofado do divã e marquesa são inflamáveis não devendo ser colocado próximo de fontes de ignição.
- O nível de ruído do motor é de <48 dB(A) (indicação do fabricante).
- Os motores têm marcação CE e garantia contra comprovados defeitos de fabrico e estão conformes as exigências das Diretivas Comunitárias respeitantes à Compatibilidade Eletromagnética e às Baixas Tensões. Esta garantia não cobre os danos causados pelo mau manuseamento do motor, cabo, comando, transformador e ficha.
- Evitar o derramamento de líquidos por cima do motor e do comando/pedal.
- Chamamos a atenção para o cuidado a ter com o manuseamento do motor / ficha, por se tratar de um produto sensível não pode sofrer qualquer tipo de pressão ou impacto porque pode danificar internamente os circuitos elétricos, recomenda-se a recolha do cabo e do pedal a quando da deslocação.
- O motor e restantes componentes após o tempo de vida útil deverão ser entregues a uma entidade licenciada para eliminação de resíduos de acordo com a legislação em vigor.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

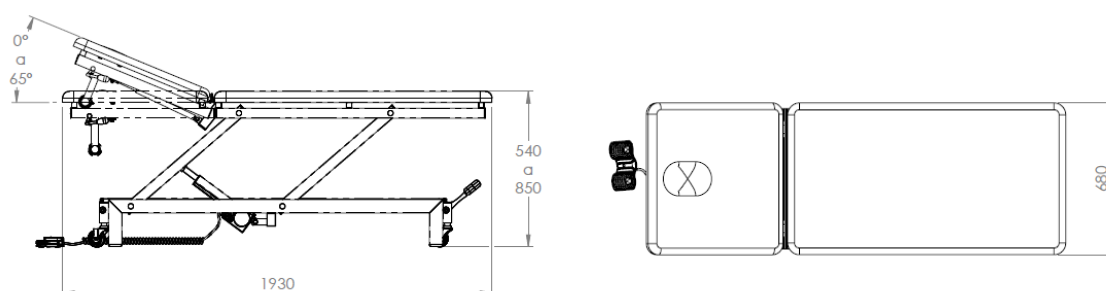

Nota: Durante a elevação dos divãs entre a posição mais baixa e a mais alta existe um deslocamento do leito de 75mm para o lado dos pés.



Muita atenção a este símbolo, ele está localizado junto das zonas de contato de duas superfícies, podendo ocorrer esmagamento devido ao movimento das secções articuladas, caso os dedos ou mãos estejam sobre zona de contato.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- A limpeza é muito simples graças à sua superfície plana. Para limpar use um pano húmido e macio e de seguida passe um pano seco.
- Nas operações de limpeza não utilizar detergentes e/ou materiais que possam danificar ou riscar este produto. Não usar detergentes, soluções com benzeno, álcool ou substâncias semelhantes, nem materiais que possam danificar o produto; use apenas água morna com sabão e seque o divã/marquesa.
- A frequência da limpeza deverá ser determinada em função das necessidades, do local onde o produto se encontra e das vezes que é usado.
- **Nunca utilize** estações de lavagem automática, lavagem em túnel, água a alta pressão ou sprays líquidos, nas operações de limpeza. Corre o risco de danificar o acabamento/pintura assim como o estofa. Evite que a água penetre nas costuras do estofa e quando não for suficiente a limpeza com um pano seco, usar uma esponja molhada em água com sabão e secar a superfície logo de seguida.

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO

- A marquesa/divã é fornecido montado e embalado em cartão e/ou filme.
- Devem ser armazenadas em locais com temperatura e humidade controlada (temperatura abaixo dos 25°C, humidade inferior a 60%), de forma a não danificar a embalagem nem o produto.
- Deve ser armazenado na horizontal, sempre que possível dentro da caixa, com o estofo para cima, **não devendo ser empilhado.**
- A JMS não assume qualquer responsabilidade por danos causados por mau uso, desrespeito destas ou outras indicações ou negligência na utilização e manuseamento do produto.
- À JMS reserva-se o direito de efetuar qualquer alteração ao design, funcionalidade, estética e comercialização dos seus produtos, em qualquer altura, sem aviso prévio, bem como, a atualização deste manual sempre que necessário.

PROTEÇÃO DO AMBIENTE (ELIMINAÇÃO E RECICLAGEM)

A JMS preocupa-se com a preservação do Ambiente em tudo o que faz. Solicitamos que:

- Separe os resíduos da embalagem e os encaminhe para os ecopontos correspondentes ou para operadores licenciados.
- Após o tempo de vida útil, entregue o produto a um operador licenciado.
- Não coloque o produto no lixo junto de resíduos comuns.

Obrigado pela sua colaboração!

