



**CAMA ARTICULADA ELÉTRICA
COM ELEVAÇÃO EM H
PACMAE002
MANUAL DE INSTALAÇÃO/UTILIZAÇÃO**

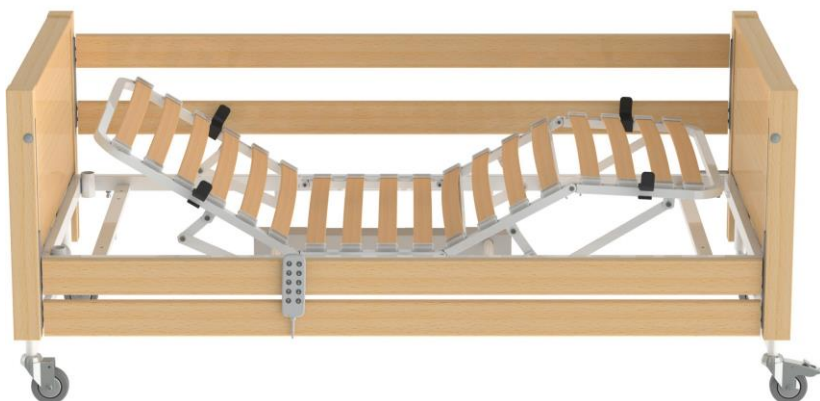

INSTRUÇÕES INSTALAÇÃO


1

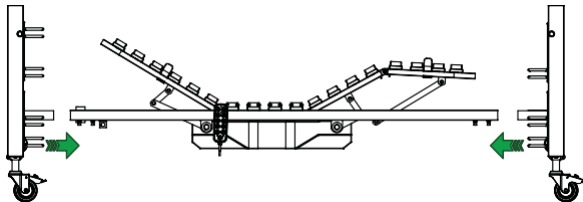

Passo 1:

Montar a cabeceira e a peseira através do encaixe nos topos do estrado e dar um pequeno aperto através dos parafusos fornecidos com o estrado.

2

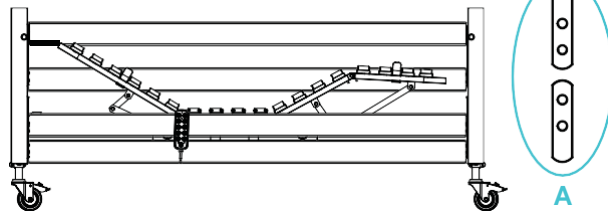


Passo 2:

Montar as réguas laterais nos pinos que se encontram nas cabeceiras. As réguas devem ser montadas de acordo com a imagem acima (A), com a régua inferior com os orifício voltados para cima, enquanto a régua superior montada com os orifícios voltados para baixo. Após a montagem das guardas laterais, ajustar as cabeceiras e apertar as mesmas através dos parafusos de forma permanente.

NOTA: Verificar se quando as guardas se encontram em baixo se entre as mesmas fica um espaçamento de $\pm 25\text{mm}$. Se o espaçamento for diferente significa que as mesmas se encontram mal montadas.

3

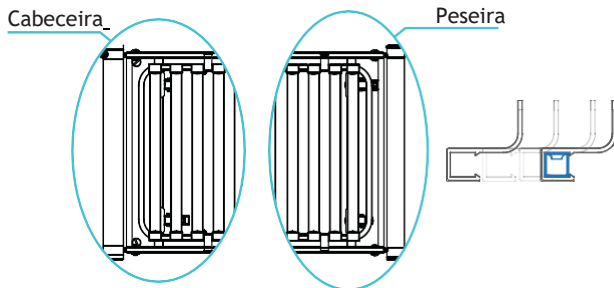


Passo 3:

Montar os suportes de colchão conforme a figura, fixando nas estruturas articuladas da cabeceira e dos pés, pelo lado interior da estrutura.

Na cabeceira, encaixar no espaço entre a terceira e a quarta régua, enquanto nos pés encaixar entre a segunda e terceira régua.

4

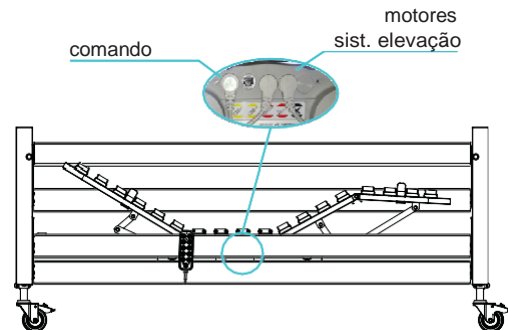


Passo 4:

Conectar os dois motores de acordo com a imagem.


INSTRUÇÕES UTILIZAÇÃO

• Identificação da cama

A identificação da cama é feita por uma etiqueta colocada na mesma.

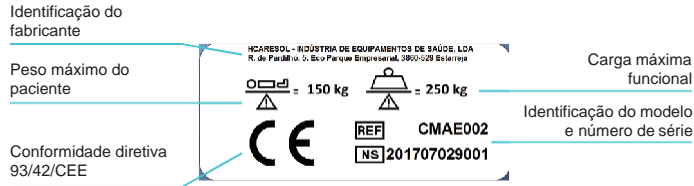

• Manuseamento das guardas

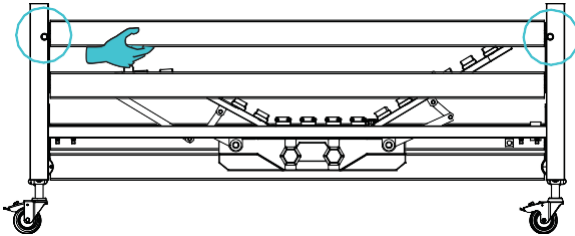


Para baixar as guardas, com uma mão levantar a régua superior de forma a soltar o botão que se encontra na lateral das cabeceiras. Com a outra mão pressionar o botão de forma a destrancar a guarda. Acompanhar a descida da guarda para que esta não se danifique nem cause lesões ao paciente ou/e utilizador. Proceder de igual modo do lado oposto.

Para subir as guardas, levantar junto a cada uma das cabeceiras a guarda superior até ao limite da calha até ouvir um “click” de fixação da mesma.

• Articulação do estrado

A articulação das secções do estrado, bem como o ajuste em altura do sistema de elevação é processada pelo comando.

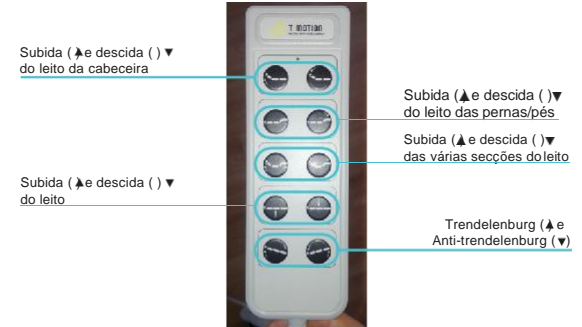

ATENÇÃO

- Antes da articulação das diversas secções do leito garantir que não existem obstáculos nas zonas móveis.
- Risco de entalamento nas zonas móveis da cama.

INSTRUÇÕES MANUTENÇÃO

A reparação e manutenção das camas Hcaresol bem como os respetivos componentes deve ser feita por pessoal com a instrução ou formação adequada.

- Recomenda-se a inspeção periódica visual das cabeceiras e encaixes para deteção de eventuais danos;
- Verificar periodicamente se as cabeceiras se encontram devidamente fixas à cama.
- Verificar se os botões de fixação das guardas quando subidas se encontram a funcionar corretamente;
- Verificar periodicamente o estado dos parafusos;
- Limpar as guardas com um pano macio. Não utilizar produtos ácidos, alcalinos, solventes ou abrasivos que possam danificar a madeira e consequentemente o bom funcionamento das guardas.