

CADEIRA DE REOLHA DE SANGUE ARTICULADA

PAEARS002

MANUAL DE INSTALAÇÃO/UTILIZAÇÃO




HCARESOL
HEALTHCARE
SOLUTIONS



HcAresol- Industria de Equipamento de Saúde, Lda.
Rua de Veiros, Lote 6, Eco-Parque Empresarial
www.hcaresol.pt
T. +351 234 811 400

MI-PAEARS002-0

INSTRUÇÕES INSTALAÇÃO

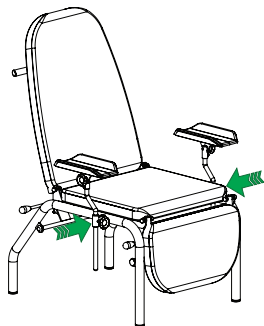

A cadeira de recolha de sangue é enviada já montada, sendo apenas necessário colocar os suportes de braço no respetivo encaixe.

INSTRUÇÕES MANUTENÇÃO

- Recomenda-se a inspeção periódica visual das partes de ajuste da cadeira de recolha de sangue;
- Limpar com um pano macio. Não utilizar produtos ácidos, alcalinos, solventes ou abrasivos que possam danificar o bom funcionamento da cadeira e o revestimento da mesma.

INSTRUÇÕES UTILIZAÇÃO


● Ajuste do pousa braços

O pousa braços possui dois pontos de ajuste.


O primeiro ponto de ajuste (A), permite a regulação do pousa braços em altura e aumentar ou diminuir a distância do mesmo à cadeira.

O segundo ponto de ajuste (B), permite a regulação da inclinação do pousa braços.

Para o ajuste de cada um destes pontos, deve aliviar a pressão do manípulo que se encontra assinalado na imagem. Após o ajuste voltar a apertar o manípulo até fixar o pousa braços.

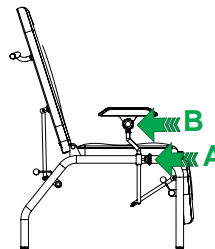

● Ajuste da cabeceira e pousa pernas

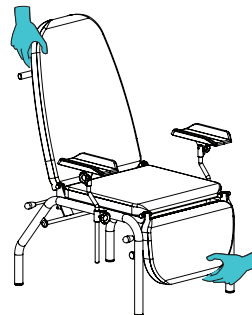

O ajuste da cabeceira e suporte de pernas da cadeira é feita por um sistema de alavanca manual.

Para elevar a cabeceira e o suporte de pernas deve puxar-se o leito até posição pretendida.

Para a descida, deve-se com uma mão pressionar a alavanca identificada na imagem, enquanto com a outra mão amparar o leito para não ter uma descida abrupta.