



10.DV.1600



10.DV.1611



Este manual refere-se aos produtos cujas referências são:

Ref.ª	ESTRUTURA			LEITO MADEIRA E ESPUMA REVESTIDO A NAPA		Abertura Facial		PÉS	Peso Kg
	Aço Pintado	Aço Inox	Madeira	Bipartido	Tripartido	Sim	Não	Tacos	
10.DV.1600	✓			✓			✓	✓	29
10.DV.1601	Conjunto pés Diva/Marquesa 600mm T.Quad. pintado								
10.DV.1605*	✓			✓		✓		✓	24,6
10.DV.1611		✓		✓			✓	✓	
10.DV.1612*				✓		✓		✓	
10.DV.1634	Conjunto pés Diva/Marquesa 750mm T.Quad. pintado								
10.DV.1635	✓			✓			✓	✓	29,6
10.DV.1636*				✓		✓		✓	
10.DV.1637		✓		✓			✓	✓	25,6
10.DV.1638*				✓		✓		✓	

As referências com * possuem na
cabeceira **Abertura Facial**



FIM A QUE SE DESTINA

Estrutura bipartida destinada aos seres humanos para diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença, lesão ou deficiência.

Dispositivo Médico Não Ativo Classe I. - DL 145/2009 que transpõe a Diretiva nº 2007/47/CE.(MDD 93/42/EEC). Registo no Infarmed nº CLI/091/02.

CUIDADOS E INDICAÇÕES A TER EM ATENÇÃO

- ✓ Ao utilizar, manusear e limpar este produto deve ler atentamente estas indicações e seguir as recomendações do fabricante.
- ✓ Verificar se os manípulos de fixação das secções articuladas estão bem presos antes da colocação do paciente.
- ✓ Ter em atenção ao perigo de esmagamento nas zonas da articulação.
- ✓ Os divãs/marquesas não devem ser usados por pacientes com peso superior a 130 kg.
- ✓ Aconselha-se o transporte/movimentação do produto por pelo menos duas pessoas.
- ✓ O conjunto estofado é inflamável deverá ser protegido de qualquer fonte de ignição ou produto inflamável.
- ✓ Quando efetuar a alteração do ângulo da cabeceira dos divãs verificar se o mecanismo de fixação das secções articuladas está devidamente presos de forma a evitar movimentos inesperados.

Dimensões do divã 10.DV.1600/5/11/2: 1850x600x600mm.

Altura do estofado 50mm (parte estofada)

Ângulo da cabeceira: 0° a 45°

Altura da parte mais baixa do estofado ao chão é de 560mm

Altura parte mais alta do estofado ao chão é de 600mm

Dimensões do divã 10.DV.1635/6/7/8: 1850x600x750mm.

Altura do estofado 50mm (parte estofada)

Ângulo da cabeceira: 0° a 45°

Altura da parte mais baixa do estofado ao chão é de 710mm

Altura parte mais alta do estofado ao chão é de 750mm



Muita atenção a este símbolo, ele está localizado junto das zonas de contato de duas superfícies, podendo ocorrer esmagamento devido ao movimento das secções articuladas, caso os dedos ou mãos estejam sobre zona de contato.

- ✓ **Atenção ao possível perigo de esmagamento dos dedos ou mãos nas partes fixas:**
- ✓ Entre os 4 manipuladores que fixam as pernas e a estrutura do estofado a quando do aperto dos pés.
- ✓ Na dobradiça que une o estofado da cabeceira e a articulação.
- ✓ Entre os dois segmentos estofados quando se altera o ângulo da cabeceira para a posição horizontal.



- ✓ **Atenção ao possível perigo de esmagamento dos dedos ou mãos nas partes móveis:**
- ✓ Entre a cabeceira e a estrutura quando é dobrada.
- ✓ Entre a alavanca e o estofado da cabeceira quando é dobrada.
- ✓ No espaço entre os dois estofados.
- ✓ Recomenda-se o uso da folha de papel entre o estofado e o paciente.
- ✓ Os divãs devem ser transportados/armazenados dentro da própria caixa/embalagem na posição horizontal com a parte estofada voltada para cima. Devem ser guardados num espaço resguardado de condições climáticas adversas e da possível queda de objetos que possam danificar o produto ou embalagem.




INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

10.DV.1600/5/35/6


Encaixar os pés na estrutura que suporta o leito e apertar manualmente os 4 manipuladores (incluídos), conforme indicado na figura pelos círculos



10.DV.1600

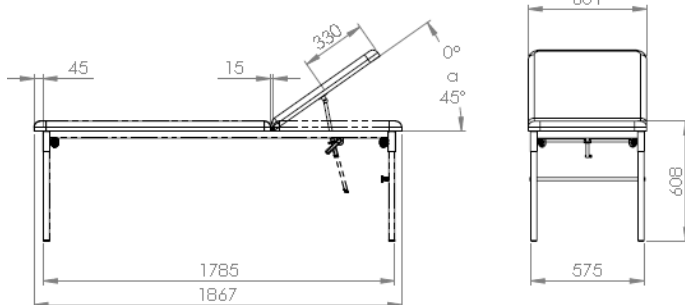

10.DV.1636

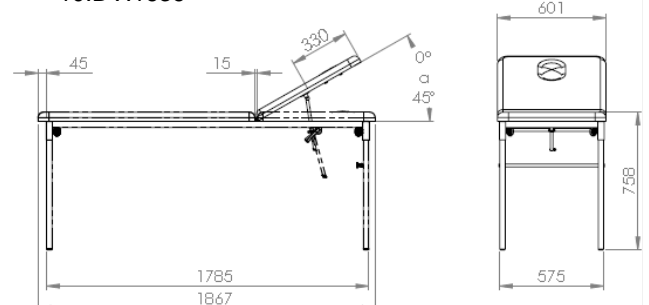

LIMPEZA

- ✓ Para limpar use um pano húmido e macio e de seguida passe um pano seco.
- ✓ **Limpeza do estofado:** Tirar o pó com um pano húmido. Quando não for suficiente usar uma esponja molhada em água com sabão, limpando com um pano seco de seguida. Evitar que a água penetre nas costuras.
- ✓ Nas operações de limpeza não utilizar detergentes e/ou materiais que possam danificar ou riscar este produto.
- ✓ Nas operações de limpeza e desinfeção recomenda-se a utilização de um produto apropriado para limpeza e desinfeção de dispositivos médicos. A frequência da limpeza deverá ser determinada em função das necessidades, do local onde este produto se encontra e das vezes que é usado.
- ✓ **Nunca utilize** estações de lavagem automática, lavagem em túnel, água a alta pressão ou sprays líquidos, nas operações de limpeza. Corre o risco de danificar o acabamento/pintura.
- ✓ Não utilize solventes como benzeno, álcool ou substâncias semelhantes!

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO

- ✓ Os Divãs/Marquesas são fornecidos embalados em cartão e/ou filme sendo necessário apenas a remoção da embalagem.
- ✓ Os Divãs/Marquesas devem ser transportados/armazenados dentro da própria caixa/embalagem na posição horizontal com a parte estofada voltada para cima, não devendo ser empilhados.
- ✓ Devem ser armazenadas em locais com temperatura e humidade controlada (temperatura abaixo dos 25°C, humidade inferior a 60%), de forma a não danificar a embalagem nem o produto.
- ✓ Devem estar protegidas de eventuais quedas de objetos.
- ✓ A JMS não assume qualquer responsabilidade por danos causados por mau uso, desrespeito destas ou outras indicações ou negligência na utilização e manuseamento do produto.
- ✓ À JMS reserva-se o direito de efetuar qualquer alteração ao design, funcionalidade, estética e comercialização dos seus produtos, em qualquer altura, sem aviso prévio, bem como, a atualização deste manual sempre que necessário.

PROTEÇÃO DO AMBIENTE

A JMS preocupa-se com a preservação do Ambiente em tudo o que faz. Solicitamos que:

- ☞ Separe os resíduos da embalagem e os encaminhe para os ecopontos correspondentes ou para operadores licenciados.
- ☞ Após o tempo de vida útil, entregue o produto a um operador licenciado.
- ☞ Não coloque o produto no lixo junto de resíduos comuns.
- ☞ Obrigado pela sua colaboração!



JMS - Indústria de Mobiliário Hospitalar, S.A.

Zona Industrial do Bunheiro - Rua da Zona Industrial, n.º 26 - Apartado 19 - 3871-909 MURTOSA
Tel. +351 234880018 - Fax +351 234880017 - Contribuinte n.º 506 846 601
pagina : www.jmshospitalar.com / e.mail : jms@jmshospitalar.com